



## VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS OG FØLG ANVISNINGERNE OMHYGGELIGT!


Kære bruger!

PARI GmbH vil gerne informere Dem om nogle vigtige forhold vedrørende sikkerheden ved PARI-inhalationsapparater.

Som ved alle andre elektrisk drevne apparater er netbøsningen på kompressorapparater et følsomt område. Denne bøsning kan ved et fald (f.eks. fra bordet), et kraftigt skub eller en rykvis trækbelastning af den isatte netledning beskadiges, så strømførende kontakter kommer til at ligge frit. En sådan beskadigelse kan også opstå, hvis apparatet transporteres skødesløst, mens netledningen er sat i apparatet, og i den forbindelse udsættes for et kraftigt slag i stikområdet (f.eks. et kraftigt skub mod dørrammen). **En skade, der evt. opstår på netbøsningen, kan ikke altid konstateres.** Vær derfor opmærksom på, at et apparat, hvor bøsningen tidligere er blevet beskadiget eller er knækket af eller revnet, udgør en potentiel risiko for elektrisk stød.

Anvend derfor ikke apparatet, hvis der er synlige skader på huset eller netbøsningen.

For småbørn, børn og andre patienter, der er afhængige af andres hjælp, udgør inhalation uden opsyn en sikkerhedsrisiko.

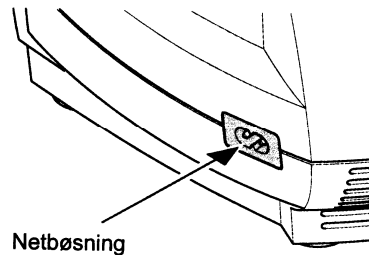

De har mulighed for at kontrollere, at netbøsningen sidder fast som vist i figur 2:

Træk apparatets stik ud af vægkontakten (figur 1). Tag stikket, der er sat i apparatet, mellem tommelfinger og pegefinger. Hvis bøsningen, uden at det kræver anstrengelse, kan bevæges op og ned (en let vippen er normal) og herved kan trækkes ud ved hjælp af langsomme, cirkulerende bevægelser, er bøsningen beskadiget. Fortsæt under ingen omstændigheder med at anvende apparatet, og kontakt straks PARI-servicecentret for at aftale den nødvendige reparation.

Denne test bør gentages med jævne mellemrum.

Hvis De er usikker på, om De har udført testen korrekt, kan De trygt henvende Dem til PARI-servicecenteret.

Følg også sikkerhedsanvisningerne i kompressorens og forstøverens brugsanvisning.

### PARI GmbH

Yderligere produktinformationer og de aktuelle udgaver af brugsanvisningerne kan fås på internettet på [www.pari.de](http://www.pari.de) eller direkte til vores Pari servicecenter:

Technischer Service , Holzhofstrasse 10b ,D-82362 Weilheim, Germany

I Danmark kan kontaktes:  
Medinor A/S  
Langebjerg 35B  
4000 Roskilde  
Telefon: 7015 1041

